

多功能弱视综合治疗仪操作指南

适用型号：SJ-400

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用，禁忌内容或者注意事项详见说明书


本指南内容仅供参考，产品信息请以实物及官网最新内容为准。

一、海丁格光刷

≈5 分钟

1. 打开主机顶盖，装入黑白图片盒，合上主机顶盖。
2. 向下转动主机左侧的功能片旋钮，将蓝片对准透光孔。
3. 转动主机顶部旋钮，将 1 图对准透光孔。
4. 按【光刷】键功能启动，主机内发出蓝光。
5. 患者透过目镜用眼注视图案中部，直至训练时间到，功能运行结束。


注意：光刷是一个旋转小阴影，跟随眼注视点移动而移动。若患者无法看清楚或无法看到光刷，则始终注视图案中部进行训练。

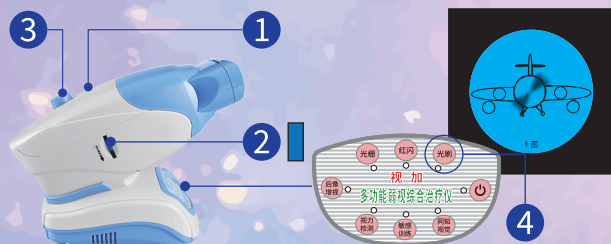

二、红光闪烁

≈5 分钟


1. 打开主机顶盖，装入黑白图片盒，合上主机顶盖。
2. 向下转动主机左侧的功能片旋钮，将红片对准透光孔。
3. 转动主机顶部旋钮，将 2 图至 6 图任意一个对准透光孔。
4. 按【红闪】键功能启动，主机内发出红光。
5. 患者透过目镜用眼注视图案内容，数几何图形数量、或辨别视标 E 的开口方向。参考答案表核对是否正确。
6. 直至训练时间到，功能运行结束。

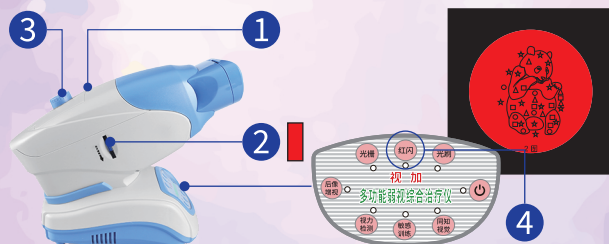

三、光栅

≈5 分钟

1. 打开主机顶盖，装入黑白图片盒，合上主机顶盖。
2. 向下转动主机左侧的功能片旋钮，将条纹片对准透光孔。
3. 转动主机顶部旋钮，将 2 图至 6 图任意一个对准透光孔。
4. 按【光栅】键功能启动，主机内发出光，条纹片旋转。
5. 患者透过目镜用眼注视图案内容，手持配件塑料笔，从主机右侧描图孔伸入，沿着图案中图形的边缘描图。
6. 直至训练时间到，功能运行结束。

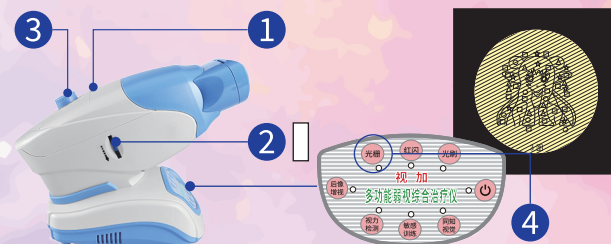


四、后像增视

≈30 秒
+
≈2 分钟

注意：眼球震颤、旁中心注视或不懂注视黑点图的患者不应使用本功能。本功能仅适用于单眼使用，不得双眼同时使用。

1. 打开主机顶盖，装入黑白图片盒，合上主机顶盖。
2. 向下转动主机左侧的功能片旋钮，选择透光孔。
3. 转动主机顶部旋钮，将 7 图（黑点）对准透光孔。
4. 把遮眼挡板插入目镜上，只留下单目镜可用。
5. 按【后像增视】键功能启动，主机内发出强光。
6. 患者透过目镜单眼注视图案黑点，避免看强光。
7. 当 30 秒之后强光变弱时，再转动主机顶部旋钮，将 8 图对准透光孔。
8. 患者透过目镜单眼注视图案内容，辨别图案上视标的指向，直至训练时间到，功能运行结束。

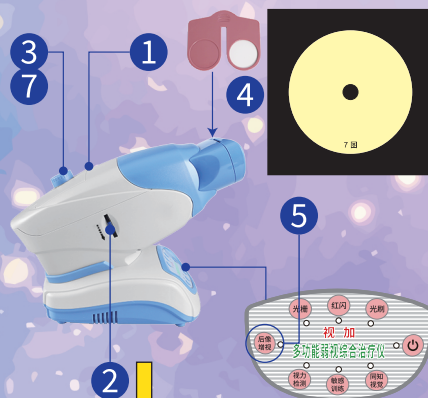


五、视力检测

≈1.5 分钟

1. 打开主机顶盖，装入黑白图片盒，合上主机顶盖。
2. 向下转动主机左侧的功能片旋钮，选择透光孔。
3. 转动主机顶部旋钮，将“视力检测表”对准透光孔。
4. 按【视力检测】键功能启动，主机内发出光。
5. 患者透过目镜用眼注视图案内容，辨别视标 E 的开口方向。以看到最小视标那行作为近用视力水平 * (如 0.5)。


* 只作为参考视力用，与远用视力有 1 行~2 行差异。

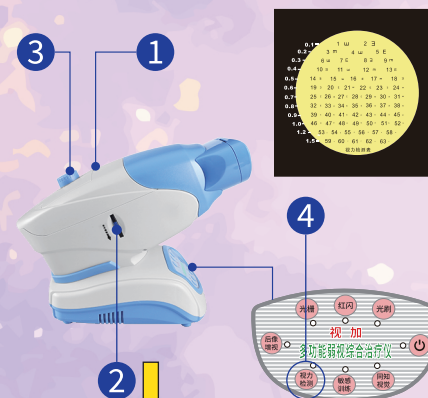

六、敏感训练

≈5 分钟

1. 打开主机顶盖，装入黑白图片盒，合上主机顶盖。
2. 向下转动主机左侧的功能片旋钮，选择透光孔。
3. 转动主机顶部旋钮，将 1E 图～ 12E 图中适宜的一个（与视力检测功能结果相对应的图，如 0.5 则选 5E）对准透光孔。
4. 按【敏感训练】键功能启动，主机内发出闪烁光。
5. 患者透过目镜用眼注视图案内容，辨别视标 E 的开口方向，直至训练时间到，功能运行结束。

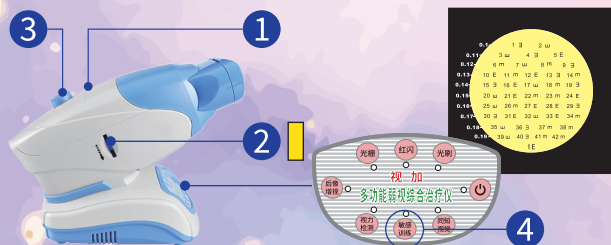


九、立体视觉

≈5 分钟

- 注意：本功能仅适用于双眼同时使用，不得单眼使用。
1. 打开主机顶盖，装入彩色图片盒，合上主机顶盖。
 2. 向下转动主机左侧的功能片旋钮，选择透光孔。
 3. 转动主机顶部旋钮，将 L1 图～ L5 图中适宜的一个对准透光孔。
 4. 把色差片插入目镜上，左边蓝色、右边红色。
 5. 按【同知视觉】键（第 3 次）功能启动，主机内发出光。
 6. 患者透过目镜用眼注视图案内容，辨别图案中各物件的远、中、近的距离，直至训练时间到，功能运行结束。

注意：当患者完全辨别出前一个图案中各物件距离顺序后（如 L1 图），再选择下一个图案继续辨别（如 L2 图）。

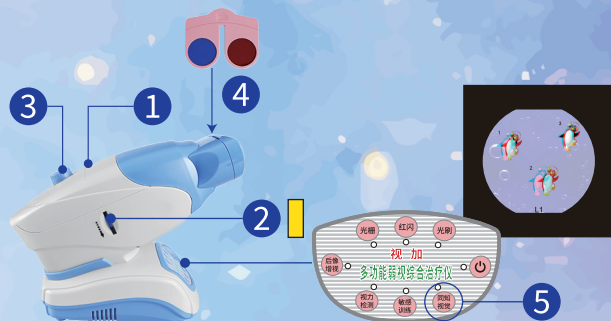


七、同知视觉

≈5 分钟

注意：本功能仅适用于双眼同时使用，不得单眼使用。

1. 打开主机顶盖，装入彩色图片盒，合上主机顶盖。
2. 向下转动主机左侧的功能片旋钮，选择透光孔。
3. 转动主机顶部旋钮，将 T1 图～ T5 图中适宜的一个对准透光孔。
4. 把色差片插入目镜上，左边蓝色、右边红色。
5. 按【同知视觉】键（第 1 次）功能启动，主机内发出光。
6. 患者透过目镜用眼注视图案内容，辨别图案中各编号对应的图形形状，直至训练时间到，功能运行结束。

注意：当患者完全辨别出前一个图案中所有图形形状后（如 T1 图），再选择下一个图案继续辨认（如 T2 图）。

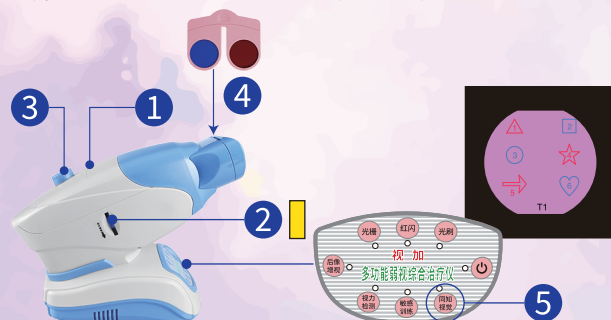


八、融合视觉

≈5 分钟

注意：本功能仅适用于双眼同时使用，不得单眼使用。

1. 打开主机顶盖，装入彩色图片盒，合上主机顶盖。
2. 向下转动主机左侧的功能片旋钮，选择透光孔。
3. 转动主机顶部旋钮，将 R1 图～ R5 图中适宜的一个对准透光孔。
4. 把色差片插入目镜上，左边蓝色、右边红色。
5. 按【同知视觉】键（第 2 次）功能启动，主机内发出光。
6. 患者透过目镜用眼注视图案内容，辨别图案中动物图是形成一个还是分开为两个，直至训练时间到，功能运行结束。

注意：当患者能看到形成为一个的动物图后（如 R1 图），再选择下一个图案继续辨认（如 R2 图）。

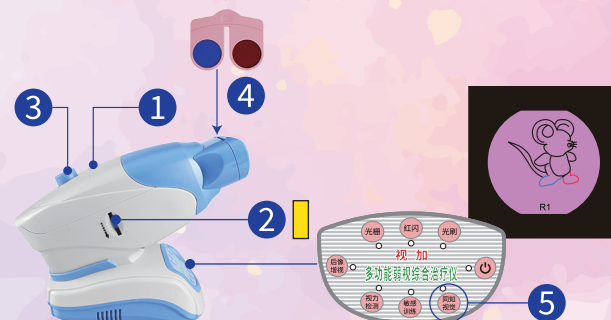

主要配件



黑白图片盒 A
(训练图案 FG-A)

黑白图片盒 B
(训练图案 FG-B)

彩色图片盒
(训练图案 FG-400)



色差片



遮眼挡板




塑料笔

如何观看操作视频？



扫码关注公众号

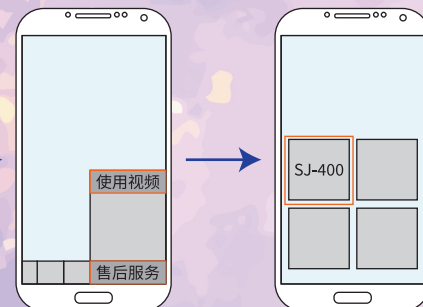

广州市视加医疗仪器设备有限公司

联系电话：020-38032632, 020-38032635; 维修电话：020-34707913

官方网址：www.world-eye.com