

⚠️ 主机接上电源后，**长按**  开机，进入准备状态。
在功能运行中，**短按**  一下，功能停止，返回准备状态。

适用型号：SJ-PA / SJ-PB 注：图示以 SJ-PB 为例




本指南仅供功能操作参考，不能替代说明书。使用本产品前，请务必仔细阅读说明书

一、红光闪烁

≈5 分钟


1. 打开主机顶盖，装入训练图案。
2. 再插入红色滤片，合上主机顶盖。
3. 旋转主机左侧的图片旋钮，将 1 图至 3 图任意一个对准透光孔。
4. 按【红闪】键功能启动，主机内发出红光。
5. 患者透过目镜用眼注视图案内容，数几何图形数量、或辨别视标 E 的开口方向。参考答案表核对是否正确。
6. 直至训练时间到，功能运行结束。

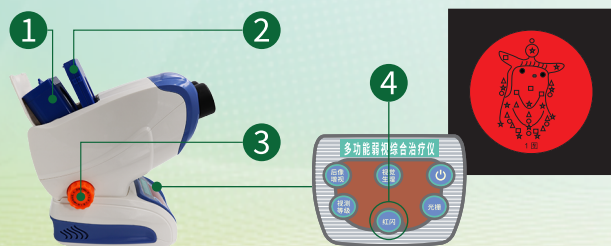

二、光栅

≈5 分钟


1. 打开主机顶盖，装入训练图案。
2. 再插入黑白光栅片，合上主机顶盖。
3. 旋转主机左侧的图片旋钮，将 4 图至 6 图任意一个对准透光孔。
4. 按【光栅】键功能启动，主机内发出光，黑白光栅片旋转。
5. 患者透过目镜用眼注视图案内容，手持配件塑料笔，从主机右侧描图孔伸入，沿着图案中图形的边缘描图。
6. 直至训练时间到，功能运行结束。

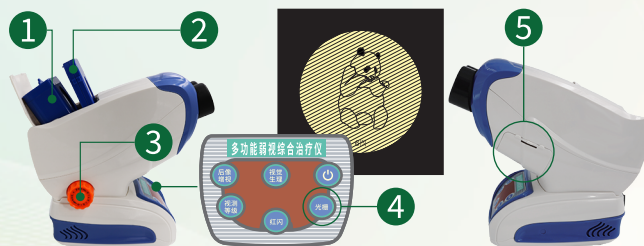

三、视觉生理

≈5 分钟

1. 打开主机顶盖，装入训练图案，合上主机顶盖。
2. 旋转主机左侧的图片旋钮，将 7 图至 8 图任意一个对准透光孔。
3. 按【视觉生理】键功能启动，主机内发出光。
4. 患者透过目镜用眼注视图案内容。
5. 直至训练时间到，功能运行结束。

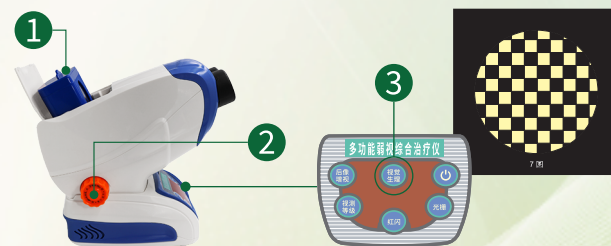


四、后像增视

≈30 秒
+
≈4.5 分钟

注意：眼球震颤、旁中心注视或不懂注视黑点图的患者不应使用本功能。本功能仅适用于单眼使用，不得双眼同时使用。

1. 打开主机顶盖，装入训练图案，合上主机顶盖。
2. 旋转主机左侧的图片旋钮，将 9 图（黑点）对准透光孔。
3. 按【后像增视】键功能启动，主机内发出强光。
4. 患者透过目镜单眼注视图案黑点，避免看强光。
5. 当 30 秒之后强光变弱时，继续透过目镜单眼注视图案内容，辨别图案上视标的指向，直至训练时间到，功能运行结束。

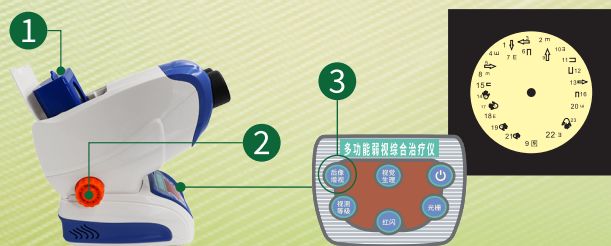


五、视力检测

≈4.5 分钟

1. 打开主机顶盖，装入训练图案，合上主机顶盖。
2. 旋转主机左侧的图片旋钮，将“视力检测表”对准透光孔。
3. 按【视测等级】键（第 1 次）功能启动，主机内发出光。
4. 患者透过目镜用眼注视图案内容，辨别视标 E 的开口方向。以看到最小视标那行作为近用视力水平 *（如 0.5）。


* 只作为参考视力用，与远用视力有 1 行 ~ 2 行差异。

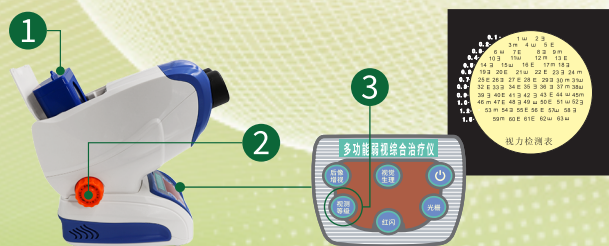

六、等级训练

≈4.5 分钟

1. 打开主机顶盖，装入训练图案，合上主机顶盖。
2. 旋转主机左侧的图片旋钮，将 1E 图 ~ 12E 图中适宜的一个（与视力检测功能结果相对应的图，如 0.5 则选 5E）对准透光孔。
3. 按【视测等级】键（第 2 次）功能启动，主机内发出光。
4. 患者透过目镜用眼注视图案内容，辨别视标 E 的开口方向，直至训练时间到，功能运行结束。

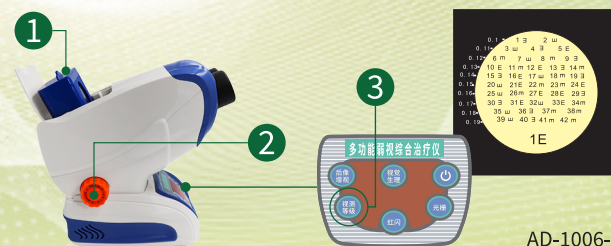

红光闪烁图答案表

1 图	△ 8 □ 6 ☆ 12 ○ 7
2 图	△ 14 □ 6 ☆ 11 ○ 8
3 图	△ 7 □ 15 ☆ 5 ○ 8

9 图答案表

1 ↓	2 ↓	3 ←	4 ↑	5 →
6 ↓	7 →	8 ↓	9 ↑	10 ←
11 ←	12 ↑	13 →	14 ↑	15 →
16 ↓	17 ←	18 →	19 →	20 ↑
21 →	22 ←	23 ↓		

视力检测表答案表

0.1	1 W 2 3
0.2	3 M 4 W 5 E
0.3	6 W 7 E 8 3 9 M
0.4	10 3 11 W 12 M 13 E
0.5	14 3 15 W 16 E 17 M 18 3
0.6	19 3 20 E 21 W 22 E 23 3 24 M
0.7	25 E 26 3 27 E 28 E 29 3 30 M 31 W
0.8	32 E 33 3 34 E 35 3 36 3 37 M 38 W
0.9	39 3 40 E 41 3 42 3 43 E 44 W 45 M
1.0	46 M 47 E 48 3 49 W 50 E 51 W 52 3
1.2	53 M 54 3 55 E 56 E 57 W 58 3
1.5	59 M 60 E 61 E 62 W 63 W

使用要点


注意：应按医嘱进行弱视治疗。若无医嘱时，请按下列建议使用产品：

1. 使用时，患者眼睛距离观察目镜 30mm 内。
2. 已配矫正眼镜者，戴着眼镜进行训练。
3. 每个训练疗程为 20 天，一个疗程内每天训练 1~2 次，每个疗程结束后休息 3 天左右，进入下一疗程。
4. 定期到医院复查，在医生指导下继续治疗。
5. 每次使用时，可采用 2~3 种以上功能搭配交替使用。
6. 清洁镜片时，只用干燥眼镜布或镜头纸，切勿用水或其他液体清洗。
7. 使用过程中如有不适，请咨询我公司客服或到医疗机构就医。

如何观看操作视频？



扫码关注公众号

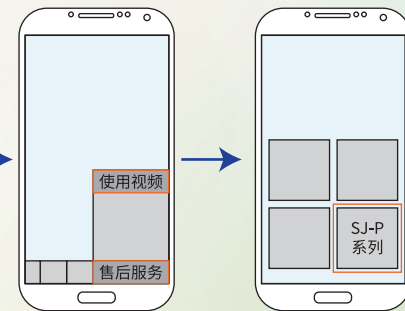

等级训练图答案表

1E 图

1 3	2 W	3 W	4 3	5 E	6 M	7 W	8 M	9 3
10 E	11 M	12 E	13 3	14 M	15 3	16 E	17 W	18 M
19 3	20 W	21 E	22 M	23 M	24 E	25 W	26 M	27 E
28 E	29 3	30 3	31 E	32 W	33 E	34 M	35 W	36 3
37 M	38 M	39 W	40 3	41 M	42 M			

2E 图

1 E	2 M	3 3	4 W	5 W	6 W	7 M	8 3	9 M
10 M	11 E	12 3	13 E	14 W	15 E	16 3	17 M	18 W
19 3	20 E	21 W	22 M	23 M	24 3	25 M	26 W	27 3
28 E	29 E	30 E	31 3	32 M	33 W	34 E	35 3	36 W
37 M	38 E	39 3	40 W	41 E	42 M			

3E 图

1 3	2 W	3 W	4 W	5 E	6 M	7 3	8 M	9 W
10 3	11 M	12 E	13 W	14 E	15 3	16 W	17 3	18 M
19 E	20 3	21 M	22 W	23 M	24 E	25 E	26 E	27 M
28 W	29 3	30 W	31 M	32 E	33 3	34 E	35 E	36 M
37 W	38 3	39 M	40 E	41 3	42 W			

4E 图

1 W	2 3	3 M	4 W	5 3	6 M	7 3	8 W	9 E
10 W	11 M	12 E	13 3	14 E	15 M	16 W	17 3	18 E
19 3	20 3	21 E	22 E	23 M	24 W	25 M	26 W	27 M
28 E	29 3	30 E	31 3	32 W	33 M	34 M	35 3	36 W
37 3	38 M	39 W	40 M	41 E	42 E			

5E 图

1 3	2 M	3 E	4 3	5 M	6 E	7 M	8 3	9 W
10 M	11 W	12 W	13 E	14 3	15 E	16 W	17 3	18 M
19 M	20 E	21 W	22 3	23 E	24 3	25 E	26 M	27 W
28 W	29 E	30 W	31 M	32 3	33 E	34 E	35 M	36 3
37 3	38 E	39 3	40 E	41 W	42 W			

6E 图

1 M	2 E	3 M	4 3	5 E	6 W	7 3	8 E	9 M
10 W	11 W	12 M	13 3	14 E	15 W	16 3	17 W	18 M
19 M	20 3	21 3	22 E	23 E	24 W	25 M	26 E	27 E
28 W	29 W	30 E	31 M	32 E	33 W	34 3	35 3	36 M
37 E	38 3	39 M	40 W	41 3	42 3			

7E 图

1 E	2 W	3 E	4 M	5 W	6 3	7 M	8 W	9 E
10 3	11 3	12 E	13 M	14 W	15 3	16 M	17 3	18 E
19 E	20 M	21 M	22 W	23 W	24 3	25 E	26 W	27 W
28 3	29 3	30 W	31 E	32 W	33 3	34 M	35 M	36 E
37 E	38 3	39 M	40 W	41 M	42 M			

8E 图

1 3	2 M	3 3	4 W	5 M	6 E	7 W	8 M	9 3
10 E	11 E	12 3	13 W	14 M	15 E	16 W	17 E	18 3
19 3	20 W	21 W	22 M	23 M	24 E	25 3	26 M	27 M
28 3	29 E	30 M	31 3	32 M	33 E	34 W	35 W	36 3
37 3	38 E	39 M	40 M	41 W	42 M			

9E 图

1 M	2 3	3 E	4 E	5 3	6 M	7 E	8 3	9 W
10 E	11 E	12 3	13 W	14 M	15 M	16 M	17 3	18 W
19 W	20 E	21 E	22 3	23 3	24 M	25 W	26 3	27 3
28 W	29 M	30 3	31 W	32 M	33 M	34 E	35 E	36 W
37 3	38 M	39 3	40 3	41 E	42 3			

10E 图

1 E	2 M	3 3	4 W	5 M	6 E	7 W	8 M	9 W
10 W	11 W	12 E	13 3	14 E	15 E	16 E	17 M	18 3
19 M	20 W	21 W	22 M	23 M	24 E	25 W	26 3	27 M
28 3	29 E	30 M	31 W	32 E	33 M	34 W	35 W	36 3
37 M	38 E	39 M	40 M	41 E	42 M			

12E 图

1 W	2 E	3 M	4 3	5 E	6 W	7 3	8 E	9 3
10 3	11 3	12 W	13 M	14 W	15 W	16 W	17 E	18 M
19 E	20 3	21 3	22 E	23 E	24 W	25 3	26 M	27 E
28 3	29 W	30 E	31 3	32 W	33 E	34 W	35 3	36 M
37 E	38 W	39 M	40 E	41 W	42 E			

广州市视加医疗仪器设备有限公司

联系电话：020-38032632，020-38032635

维修电话：020-34707913

官方网址：www.world-eye.com