

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用，禁忌内容或者注意事项详见说明书


注：本操作指南的图以SJ-300B为例，SJ-300A的操作方式与其基本一致。

一、海丁格光刷

5分钟

- 1 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- 2 转动仪器左侧拨轮，将蓝片对准目孔。
- 3 转动仪器顶部旋钮，将1图对准目孔。
- 4 按（光刷）键，仪器自动运转，并发出蓝光。
- 5 让小孩注视图案上的光刷，约5分钟语音提示后结束训练。


【注意】光刷是一个旋转小阴影，跟随眼注视点移动而移动。

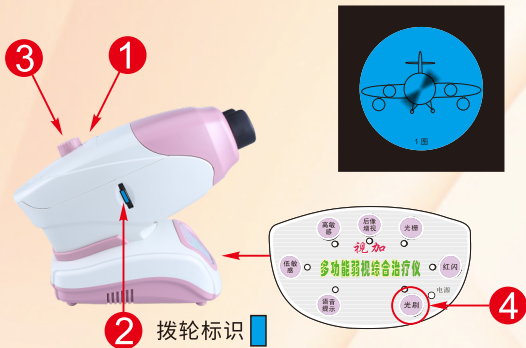

二、红光闪烁

5分钟

- 1 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- 2 转动仪器左侧拨轮，将红片对准目孔。
- 3 转动仪器顶部旋钮，将2~6图（任意一个）对准目孔。
- 4 按（红闪）键，仪器发出闪烁红光。让小孩数图案上□△○☆形状的数量，或按序号说出视标“E”的开口方向。
- 5 家长参照答案表核对，约5分钟语音提示后结束训练。

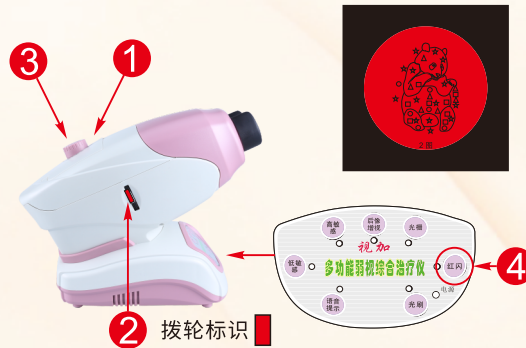

三、光栅

5分钟

- 1 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- 2 转动仪器左侧拨轮，将条纹片对准目孔。
- 3 转动仪器顶部旋钮，将2~6图（任意一个）对准目孔。
- 4 按（光栅）键，仪器带动条纹片慢转，并发出光。
- 5 打开描图孔。要求孩子通过描图孔用笔沿图案上线条描图。
- 6 约5分钟语音提示后结束训练。

【注意】描图必须使用随机附送的塑料笔。




四、后像增视

30秒 + 2分钟

【警告】眼球震颤、旁中心注视或不懂注视黑点的患者不能使用本功能。

- 1 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- 2 转动仪器左侧拨轮，将透光片对准目孔。
- 3 转动仪器顶部旋钮，将7图（黑点）对准目孔。
- 4 按（后像增视）键，仪器发出强光。
- 5 让孩子单眼注视图案中心黑点，不能看强光部分。
- 6 30秒后强光变弱，小孩眼前形成亮斑点。转动仪器顶部旋钮，将8图对准目孔。通过亮斑点辨别图案上视标指向。

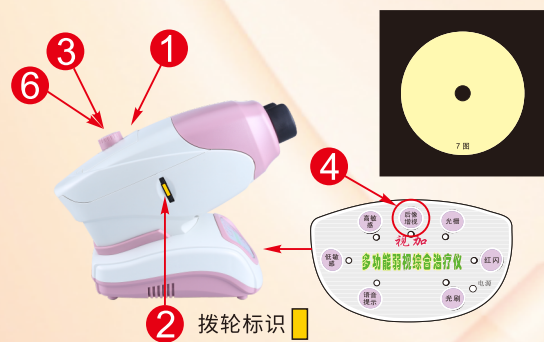

五、高敏感

3分钟


- 1 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- 2 转动仪器左侧拨轮，将透光片对准目孔。
- 3 转动仪器顶部旋钮，将“视力检测表”对准目孔。
- 4 按（高敏感）键，启动视力检测。让小孩从上到下辨别视标“E”的开口方向，以看到最细视标那行作为近距离视力水平。如：已能完全看清0.5行，表示小孩近距离视力为0.5。
- 5 转动仪器顶部旋钮，将1E~12E图（与③结果相对应的图，如0.5则选5E）对准目孔。
- 6 再按（高敏感）键，仪器发出闪烁光。让小孩从上到下辨别视标“E”的开口方向，家长参照答案表核对。
- 7 直至小孩把所有视标开口方向辨认正确，再转到【低敏感】功能继续治疗。



六、低敏感

2.5分钟

- 1 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- 2 转动仪器左侧拨轮，将透光片对准目孔。
- 3 转动仪器顶部旋钮，将1E~12E图（选【高敏感】已辨认清楚的图）对准目孔。
- 4 按（低敏感）键，仪器发出闪烁光。让小孩从上到下辨别视标“E”的开口方向，家长参照答案表核对。
- 5 直至小孩把所有视标开口方向辨认正确，才转到下一级更精细的训练图案来进行【高敏感】训练。如：5E图在【低敏感】下能辨认清楚，则下次做【高敏感】时选用6E图，如此类推。

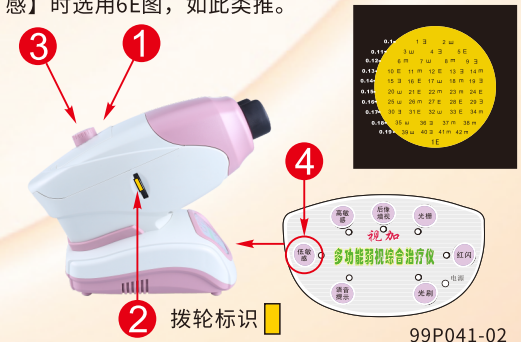

常用的弱视疗法是怎样提高视力的?

后像增视训练

让小孩单眼注视黑点，从而遮盖黄斑部中心凹，并用强光照射视网膜，使视神经中枢消除了对黄斑的抑制。当强光变成弱闪光后，黑点转变成亮斑（表示视力敏锐区功能亢进），四周的亮光变成暗影，形成后像。在亮斑形成的期间进行目力训练。

海丁格光刷训练

光刷的颜色比周围颜色深，呈紫蓝色，慢慢地旋转。让小孩通过注视旋转毛刷的宽窄不同的景象，刺激黄斑中心不同类型的细胞。

红光闪烁训练

视网膜的锥体细胞分布在视网膜黄斑部中心凹，对红光非常敏感。透过特制波长为640纳米左右的红色滤光片的光刺激视网膜黄斑部中心凹锥体细胞的敏感性。

光栅训练

光栅是一系列空间频率高、对比敏感度强的条栅，通过旋转达到强化刺激黄斑部中心凹。

家庭精细作业训练

让弱视儿童有意识地强迫弱视眼专注某一细小目标，使其弱视眼中被抑制的感光细胞受到刺激。

敏感度训练

在保持相同的视标“E”大小不变的情况下，通过将光照度有强到弱，逐渐降低对比度的方法，进行精细视力训练；或在相同的光照度情况下通过改变视标“E”大小的方法，进行目力训练，如只能看0.4，让他逐步从0.41、0.42、0.43……过渡到0.5进行视标“E”视力训练，而逐步提高视力，这样较从0.4跳到0.5更容易提高视力，就如小孩爬楼梯一样，逐级、逐级地爬，比一下子跨过更为容易。

使用要点


(在无医嘱情况下，请按下列建议进行治疗)

- ① 训练时，眼睛距离目镜在3厘米内。
- ② 已配镜者，戴着眼镜做治疗。
- ③ 每个训练疗程为20天，一个疗程内尽量每天治疗1~2次，每个疗程结束后休息3天左右，进入下一疗程。
- ④ 定期到医院复查，在医生指导下继续治疗。
- ⑤ 每次治疗时，可采用2~3种以上功能搭配交替使用。
- ⑥ 清洁镜片和图片盒时，只用干燥眼镜布或镜头纸，切勿用水或其他液体清洗。
- ⑦ 如有不适，请咨询我公司客服或到医疗机构求医。

SJ-300 治疗仪配件



治疗仪主机

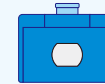

图片盒A



图片盒B

塑料笔

SJ-300A是单目目镜，SJ-300B是双目目镜。
两者配件清单一致。

如何观看操作视频?



①扫码关注



②点击页面右下方【使用视频】



③进入页面，选择相应型号产品的视频

广州市视加医疗仪器设备有限公司

联系电话: 020-38032632, 020-38032635

维修服务: 020-34707913

官方网址: www.world-eye.com



了解更多护眼知识
请关注我们的微信公众平台