

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用，禁忌内容或者注意事项详见说明书

一、海丁格光刷

5分钟

(请用图片盒A/图片盒B)

- 1 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
 - 2 转动仪器左侧拨轮，将蓝片对准目孔。
 - 3 转动仪器顶部旋钮，将1图对准目孔。
 - 4 按（光刷）键，仪器自动运转，并发出蓝光。
 - 5 让小孩注视图案上的光刷，约5分钟语音提示后结束训练。
- 【注意】光刷是一个旋转小阴影，跟随眼注视点移动而移动。




二、红光闪烁

5分钟

(请用图片盒A/图片盒B)

- 1 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- 2 转动仪器左侧拨轮，将红片对准目孔。
- 3 转动仪器顶部旋钮，将2~6图（任意一个）对准目孔。
- 4 按（红闪）键，仪器发出闪烁红光。让小孩数图案上□△○☆形状的数量，或按序号讲出视标“E”的开口方向。
- 5 家长参照答案表核对，约5分钟语音提示后结束训练。

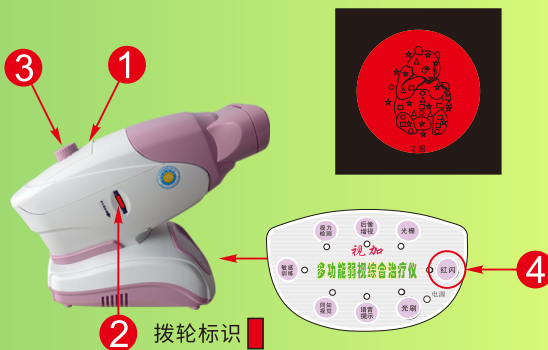


三、光栅

5分钟

(请用图片盒A/图片盒B)

- 1 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
 - 2 转动仪器左侧拨轮，将条纹片对准目孔。
 - 3 转动仪器顶部旋钮，将2~6图（任意一个）对准目孔。
 - 4 按（光栅）键，仪器带动条纹片慢转，并发出光。
 - 5 打开描图孔。要求孩子通过描图孔用笔沿图案上线条描图。
 - 6 约5分钟语音提示后结束训练。
- 【注意】描图必须使用随机附送的塑料笔。

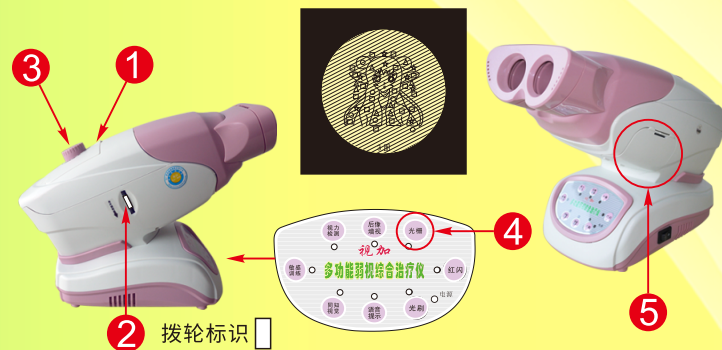

四、后像增视

30秒 + 2分钟

(请用图片盒A/图片盒B)

- 【警告】眼球震颤、旁中心注视或不懂注视黑点的患者不能使用本功能。
- 1 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
 - 2 转动仪器左侧拨轮，将透光片对准目孔。
 - 3 转动仪器顶部旋钮，将7图（黑点）对准目孔。
 - 4 把“遮光片”插在目镜上，只留单眼目镜。
 - 5 按（后像增视）键，仪器发出强光。
 - 6 让孩子单眼注视图案中心黑点，不能看强光部分。
 - 7 30秒后强光变弱，小孩眼前形成亮斑点。转动仪器顶部旋钮，将8图对准目孔。通过亮斑点辨别图案上视标指向。



五、视力检测

1.5分钟

(请用图片盒A/图片盒B)

- 1 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
 - 2 转动仪器左侧拨轮，将透光片对准目孔。
 - 3 转动仪器顶部旋钮，将“视力检测表”对准目孔。
 - 4 按（视力检测）键，让小孩从上到下辨别视标“E”的开口方向，以能看到最细视标的那一行作为近视力水平。如：已能完全看清0.5行，表示小孩近视力为0.5。
- 注意：“视力检测表”只作为参考视力用，与远视力有1~2行差距。



六、敏感训练

5分钟

(请用图片盒A/图片盒B)

- ① 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- ② 转动仪器左侧拨轮，将透光片对准目孔。
- ③ 转动仪器顶部旋钮，将1E~12E图（与【视力检测】结果相对应的图）对准目孔。
如：通过“视力检测表”检查视力结果为0.5，那么就选择5E图作为训练图案。
- ④ 按（敏感训练）键，仪器发出闪烁光。让小孩从上到下辨别视标“E”的开口方向，家长参照答案表核对。
- ⑤ 直至小孩把所有视标开口方向辨认正确，才转到下一级更精细的训练图案。
如：5E图的视标开口方向辨认正确后，转到更精细的6E图进行训练。




七、同知视觉

5分钟

(请用彩色图片盒)

- ① 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- ② 转动仪器左侧拨轮，将透光片对准目孔。
- ③ 转动仪器顶部旋钮，将T1~T5图对准目孔。
- ④ 将“色差片”插在目镜上（左蓝右红）。
- ⑤ 按（同知视觉）一次，仪器发出闪烁光。要求小孩说出各编号所对应的图形形状。家长参照答案表核对。
- ⑥ 约5分钟语音提示后结束训练。
【注意】当小孩完全辨认出一个训练图案的所有形状后（如T1），可转到下一个图案继续辨认（如T2），直到不能辨认清楚或时间为止。

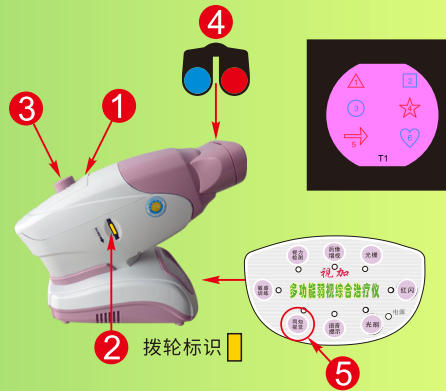

八、融合视觉

5分钟

(请用彩色图片盒)

- ① 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- ② 转动仪器左侧拨轮，将透光片对准目孔。
- ③ 转动仪器顶部旋钮，将R1~R5图对准目孔。
- ④ 将“色差片”插在目镜上（左蓝右红）。
- ⑤ 按（同知视觉）两次，仪器发出闪烁光。要求小孩说出是看到一个动物图形，还是两个分开的动物图形。
- ⑥ 约5分钟语音提示后结束训练。
【注意】当小孩能看到一个完整的动物图形在一个训练图案中（如R1），可转到下一个图案继续辨认（如R2），直到看到了两个分开动物图形或时间为止。



九、立体视觉

5分钟

(请用彩色图片盒)


- ① 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- ② 转动仪器左侧拨轮，将透光片对准目孔。
- ③ 转动仪器顶部旋钮，将L1~L5图对准目孔。
- ④ 将“色差片”插在目镜上（左蓝右红）。
- ⑤ 按（同知视觉）三次，仪器发出闪烁光。要求小孩辨认图案中三个物体的远、中、近距离。家长参照答案表核对。
- ⑥ 约5分钟语音提示后结束训练。
【注意】当小孩能完全辨认出一个训练图案中各物体的距离后（如L1），可转到下一个图案继续辨认（如L2），直到不能辨认清楚或时间为止。



如何观看操作视频？



①扫码关注

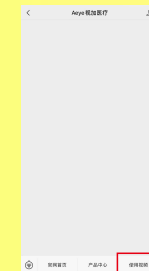

②点击页面右下方【使用视频】



③进入页面，选择相应型号产品的视频

广州市视加医疗仪器设备有限公司

联系电话：020-38032632, 020-38032635

维修服务：020-34707913

官方网址：www.world-eye.com



了解更多护眼知识
请关注我们的微信公众平台

99P042-01 CRP2108.1