


红光闪烁


- ① 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，分别将红色滤片、图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- ② 转动治疗仪左侧拨轮，将1~3图（任意一个）对准目孔。
- ③ 按（红闪）键，仪器发出闪烁红光。让患者数图案上□△○☆形状的数量，或按序号讲出视标“E”的开口方向。
- ④ 家长参照答案表核对，约5分钟语音提示后结束训练。

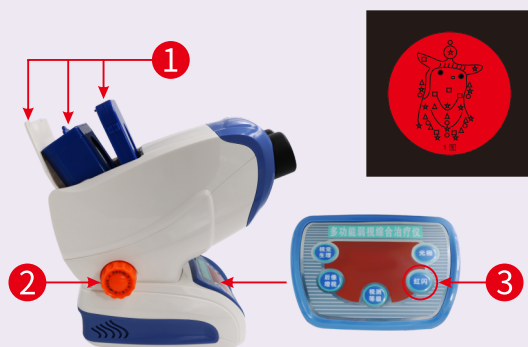

光栅


- ① 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，分别将黑白光栅片、图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- ② 转动治疗仪左侧拨轮，将4~6图（任意一个）对准目孔。
- ③ 按（光栅）键，仪器带动黑白光栅片慢转，并发出光。
- ④ 打开描图孔。要求患者通过描图孔用笔沿图案上线条描图。
- ⑤ 约5分钟语音提示后结束训练。

注意：描图必须使用随机附送的塑料笔。

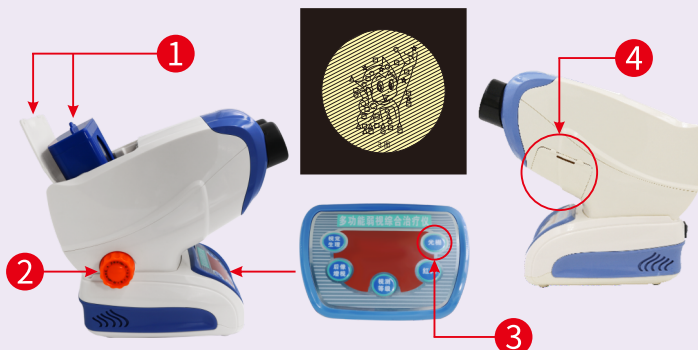

视觉生理

- ① 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- ② 转动治疗仪左侧拨轮，将7~8图（任意一个）对准目孔。
- ③ 按（视觉生理）键，仪器发出闪烁光，要求患者用眼注视图片上的图案。
- ④ 约5分钟语音提示后结束训练。

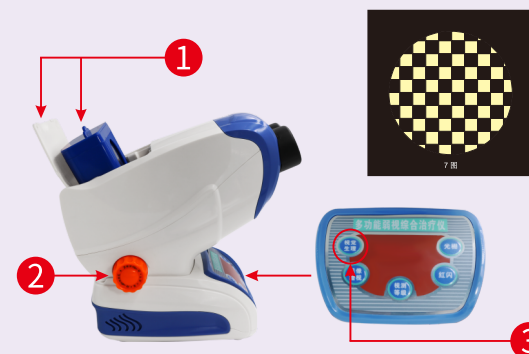

后像增视

【警告】眼球震颤、旁中心注视或不懂注视黑点的患者不能使用本功能。

- ① 用眼罩或眼贴遮盖一眼分开训练。
- ② 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- ③ 转动治疗仪左侧拨轮，将9图（黑点）对准目孔。
- ④ 按（后像增视）键，仪器发出强光，让患者单眼注视图案中心黑点，不能看强光部分。
- ⑤ 30秒后强光变弱，患者眼前形成亮斑点。通过亮斑点辨别图案上视标指向。
- ⑥ 约5分钟语音提示后结束训练。



视力检测

- ① 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- ② 转动治疗仪左侧拨轮，将“视力检测表”对准目孔。
- ③ 按（视测等级）键，让患者从上到下辨别视标“E”的开口方向，以能看到最细视标的那一行作为近视力水平。

如：已能完全看清0.5行，表示患者近视力为0.5。

【注意】“视力检测表”只作为参考视力用，与远视力有1~2行差距。




等级训练


- ① 打开治疗仪顶部的图片插槽盖，将图片盒插入后把图片插槽盖盖上。
- ② 转动治疗仪左侧拨轮，将1E~12E图（如通过【视力检测】达到的视力为0.5，那么我们就选择“5E”图作为训练图，直至完全辨别清楚才能转到“6E”如此类推……）对准目孔。
- ③ 按（视测等级）键，仪器发出光。让患者从上到下辨别视标“E”的开口方向，家长参照答案表核对。
- ④ 直至患者把所有视标开口方向辨认正确，才转到下一级更精细的训练图案来进行训练。

如：5E图能辨认清楚，则下次做训练时选用6E图，如此类推。




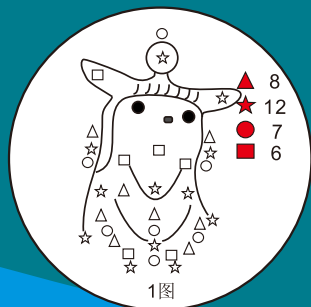

1图

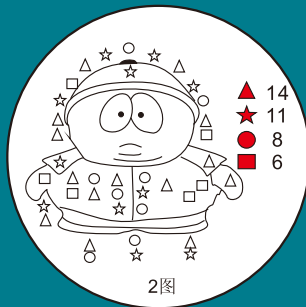

2图

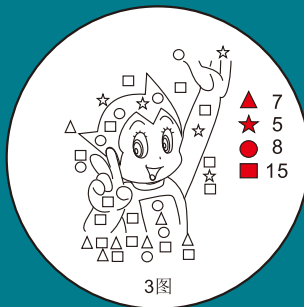

3图



4图

广州市视加医疗仪器设备有限公司


联系电话: 020-38032632, 020-38032635

维修服务: 020-34707913

官方网址: www.world-eye.com




了解更多护眼知识
请关注我们的微信公众平台

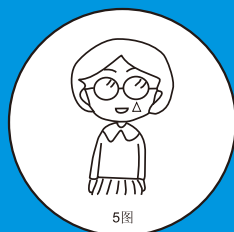


5图



6图

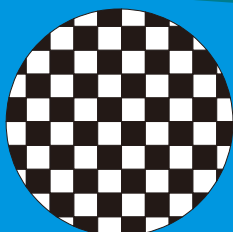


7图

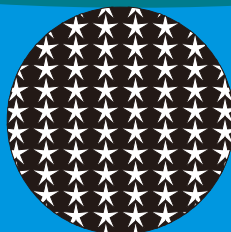


8图




9图

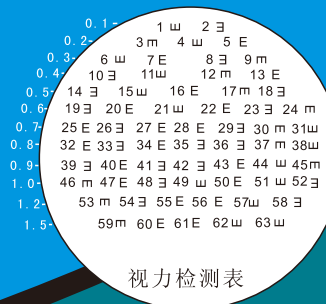


视力检测表

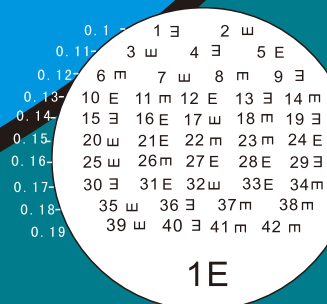


1E

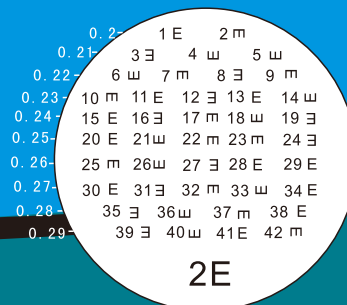


2E

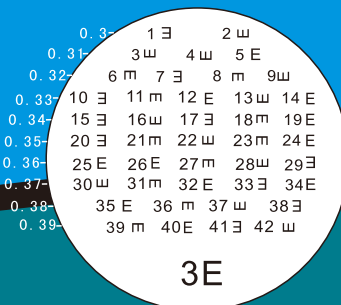


3E

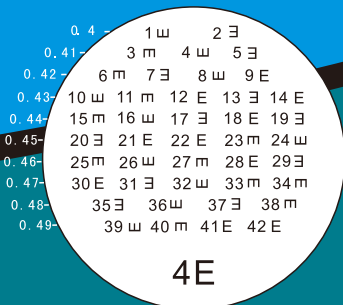


4E

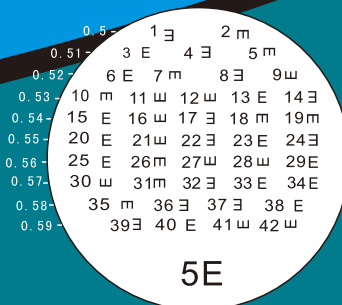


5E

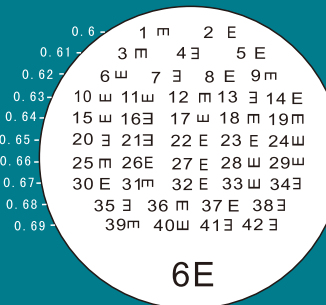


6E

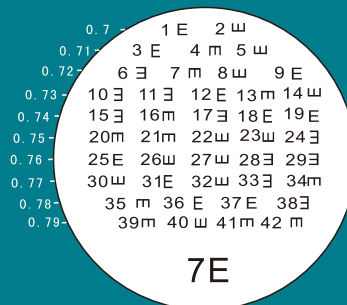


7E

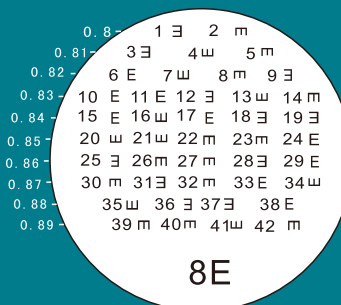


8E

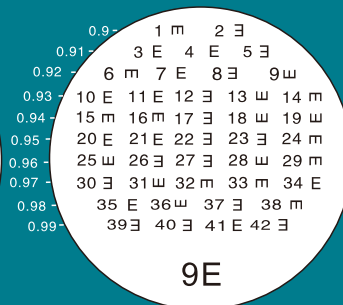

9E

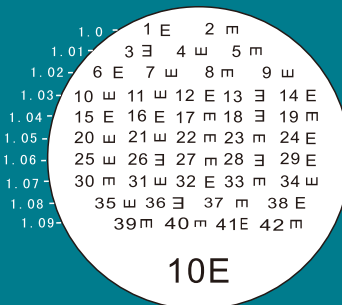

10E

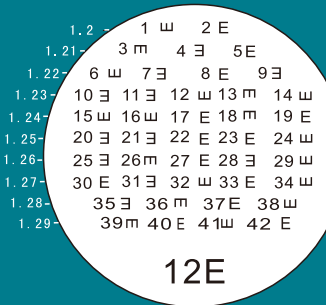

12E

使用要点

(在无医嘱情况下, 请按下列建议进行治疗)

- ① 做【后像增视】时, 遮盖一眼, 用另一眼注视黑点。
- ② 已配镜者, 戴着眼镜做治疗。
- ③ 每个训练疗程为20天, 一个疗程内尽量每天治疗1~2次, 每个疗程结束后休息3天左右, 进入下一疗程。
- ④ 定期到医院复查, 在医生指导下继续治疗。
- ⑤ 每次治疗时, 可采用2~3种以上功能搭配交替使用。
- ⑥ 正常使用时, 避免接触目镜镜片, 以免沾上污垢。若要清洁目镜镜片, 请用镜头纸, 以免划伤镜片。
- ⑦ 请勿接触图片盒的菲林片部分, 以免沾上污垢。
- ⑧ 如有不适, 请咨询我公司客服或到医疗机构求医。